

Mesures Pour Vos Loupes Ergo


Comment Prendre Votre Distance De Travail Clinique

Qu'est-ce qu'une distance de travail?

La distance de travail est décrite comme la distance entre vos yeux et l'objet observé. Cette mesure est requise dans le cadre de votre ajustement personnalisé.

Il est recommandé de prendre la mesure en milieu clinique avec un patient ou un collègue.

1. Positionnez-vous confortablement dans la position 12 heures
2. Il est important de s'asseoir dans une posture idéale car c'est la posture que vous utiliserez lorsque vous porterez les loupes
3. Placez les bras à un angle de 90°
4. Coudes près de votre corps
5. Regardez la bouche du patient - l'utilisation d'un miroir et d'un explorateur peut être utile
6. Levez la tête en position neutre, en regardant droit devant vous *très important
7. Prenez la mesure du coin externe de votre œil jusqu'au coin de la bouche du patient
8. Veuillez fournir cette mesure en pouces

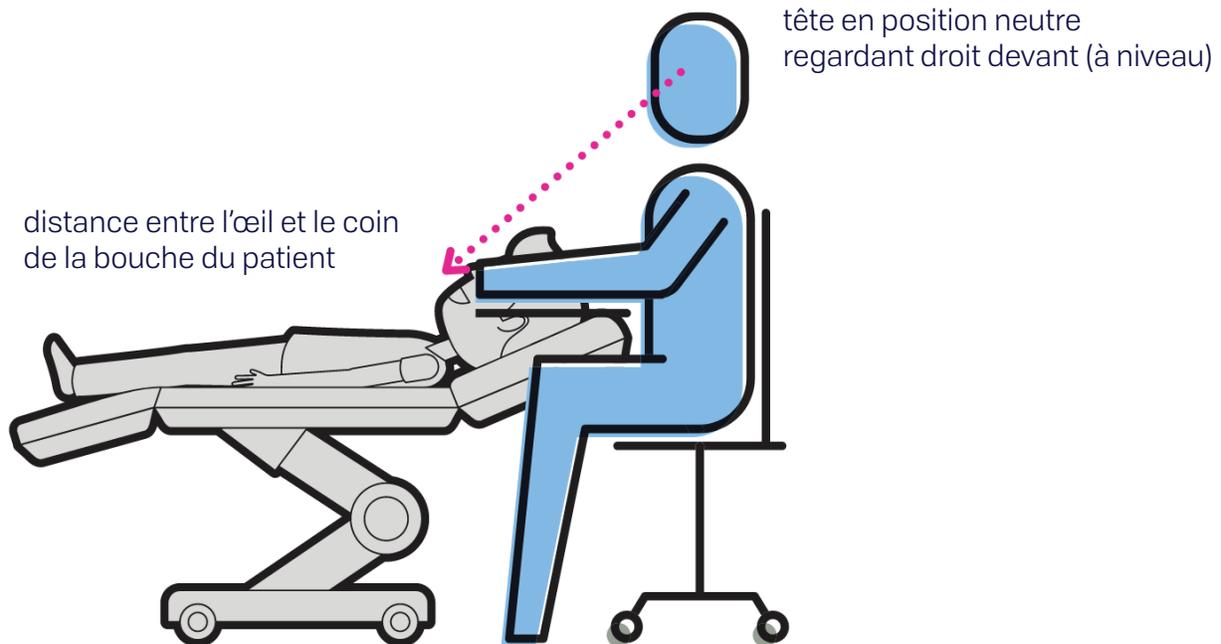

Mesures Pour Vos Loupes Ergo

Comment Prendre Vos Photos De Distance Pupillaire

Veuillez prendre plusieurs photos et les envoyer par courriel à votre gestionnaire de territoire.


Une monture spéciale de mesure vous sera fournie par Andau Medical.

1. Placez la monture de mesure de façon à ce qu'elle soit à niveau et bien serré contre le pont de votre nez
2. Les photos doivent être prises à une distance de 40 cm
3. Retirez votre masque
4. Assurez-vous que les oreilles sont visibles/ les cheveux tirés en arrière
5. Regardez directement la caméra
6. Positionnez la caméra à niveau avec les yeux. Vous ne devriez pas voir la surface inférieure ou supérieure des branches de la lunette de mesure
7. N'utilisez pas de flash. Évitez l'éblouissement en prenant des photos dans une pièce sans fenêtres ni lumières vives
8. Positionnez correctement votre menton - ni trop haut ni trop bas
9. En se plaçant de façon symétrique et centrée – positionnez la caméra parallèlement à la monture de mesure

Comment Prendre Vos Photos De La Distance Verre-Œil : Vertex

1. Placez la monture de mesure à niveau et bien serré contre le pont de votre nez
2. Retirez votre masque
3. Positionnez la caméra à niveau avec les branches de la monture de mesure.
4. Prenez 2 photos (1 de gauche + 1 de droite) à une distance de 25 cm
5. Assurez-vous que l'œil est complètement visible sous le bras de la tempe

BONNES PHOTOS

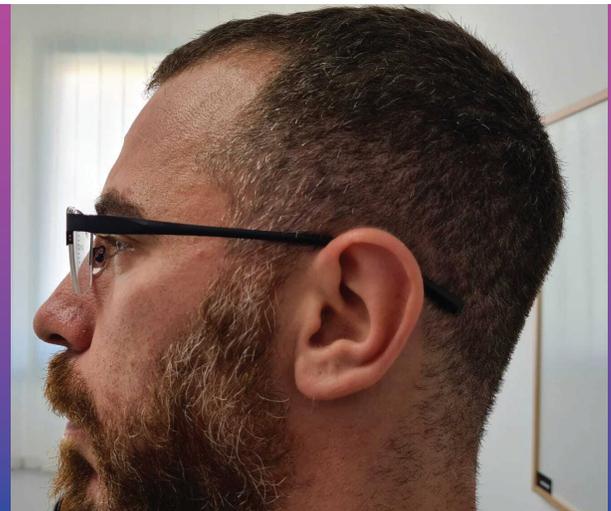

Mesures Pour Vos Loupes Ergo

Choses À Éviter Lors De La Prise De Vos Photos



CAMÉRA TROP HAUTE



CAMÉRA TROP BASSE



MENTON TROP BAS



MENTON TROP HAUT



REFLET SUR LE VERRE



MONTURE TROP BASSE



MONTURE TROP BASSE



NON SYMÉTRIQUE



NON SYMÉTRIQUE